



Hyperoil®

Dispositif médical de soins de plaies multifonctionnel d'origine végétale

**A BASE DE NEEM (MARGOUSIER) ET
HYPERICUM PERFORATUM (MILLEPERTUIS)
SANS PÉTROLATUM NI PARABÈNE**



**PROTOCOLE DE TRAITEMENT
BLESSURES MINEURES**

Hyperoil[®]

Hyperoil®

est une marque de la famille



La marque **Holoil System**®
rassemble tous les produits
à base de végétaux fabriqués par RI.MOS.

LA R&D ET LA PRODUCTION
FABRIQUÉ EN ITALIE



www.holoilssystem.com

Qu'est-ce que l'Hyperoil® ?

C'est un dispositif médical qui facilite régénération et la réparation des tissus de la peau en cas de lésions aiguës et chroniques (également infectées). Cette formule convient à toutes les phases du processus de guérison d'une lésion (nettoyage, bourgeonnement, ré-épithélialisation).

Cette formule constitue le fruit des efforts de R&D menés par Ri.Mos. pour la conception d'une méthode d'extraction, de mélange et de production de deux plantes:



MARGOUSIER

(Azadirachtine)



MILLEPERTUIS

(Hyperforine)

qui, grâce à leurs vertus, offrent les propriétés suivantes



APAISANTE



PROTÈGE LES TISSUS LÉSÉS
OU ENFLAMMÉS



FACILITE LA RÉPARATION ET
LA RÉGÉNÉRATION DES TISSUS
ENDOMMAGÉS TOUT EN
ASSURANT UN CONTRÔLE DE
LA CHARGE BACTÉRIENNE
(PROPRIÉTÉS ANTISEPTIQUES)



Hyperoil® est disponible en formulations à base d'huile ou de gel:

La **formulation huileuse** est recommandée pour traiter des lésions profondes ou plus graves, plus particulièrement lors de la **phase aiguë**.

La **gel formulation** est recommandée lors des phases de bourgeonnement et de ré-épithélialisation, ainsi que pour les lésions sèches de gravité inférieure ou supérieure.

Sans parabène ni vaseline. Dispositif médical de classe IIb

Composition de l'Hyperoil®



MARGOUSIER

Le margousier (*nīm*) (*Azadirachta indica*) est un arbre de la famille des méliacées qui comprend par ailleurs l'acajou. Il est originaire du sous-continent indien, à savoir

des pays suivants : l'Inde, le Népal, le Pakistan, le Bangladesh, le Sri-Lanka et les Maldives. Le margousier est un arbre à feuillage persistant, celui-ci pousse rapidement, pouvant atteindre une hauteur de 25 mètres (82 pieds) et vivre jusqu'à 300 ans.

Le margousier est considéré comme un composant majeur dans la tradition ayurvédique, et ce depuis des milliers d'années.

Les anciens textes sanskrits nous enseignent que chaque partie de cet arbre (les feuilles, l'écorce, le bois, les racines, la pulpe des fruits, les fleurs) contient des substances aux vertus médicinales.

C'est pour cette raison qu'en Inde, le margousier est aussi connu sous le nom de "Pharmacie du village".

Le margousier est si important que plusieurs organisations à but non lucratif, comme la **NEEM Foundation**, et des réseaux de recherche, explorent et évaluent en permanence ses propriétés et ses champs d'application.

D'après l'Organisation des Nations Unies, le margousier est "l'arbre du XXI^e siècle".

HYPERICUM PERFORATUM

Le **millepertuis perforé**, connu sous le nom d'herbe de la St-Jean, est une plante à fleurs de la famille des hypéricacées. Les fleurs varient d'une teinte jaune clair à une teinte jaune foncé, et d'un diamètre de 0,5 à 6 cm. Elles comportent chacune cinq (rarement quatre) pétales, la plupart d'entre eux ayant des étamines proéminentes.

L'herbe de la St-Jean (**Millepertuis perforé**) est utilisée depuis longtemps en herboristerie et en médecine populaire pour ses vertus médicinales. L'extrait rouge et huileux de millepertuis perforé est **utilisé depuis des millénaires lors du traitement des lésions** ; il a été utilisé par l'Ordre des Hospitaliers, l'Ordre de Saint - Jean, après avoir combattu lors des Croisades, d'où il tire très probablement l'origine de son nom.



Formulation végétale

À quoi sert - elle?



APHTES
HERPÈS • ABCÈS
AVANT ET APRÈS LA RÉALISATION
D'UN TATOUAGE



ACNÉ
OTITES EXTERNES



BRÛLURES (ÉGALEMENT LES
BRÛLURES AU LASER)
ABRASIONS ET ECCHYMOSES
ECZÉMA • URTICAIRE



HÉMORROÏDES (AMAS) • FISTULE
CREVASSES ANALES/VAGINALES
DÉMANGEAISONS GÉNITALES



PIQÛRES D'INSECTES
PLAIES TRAUMATIQUES
MYCOSES • ENGELURES
CREVASSES SUR
LES MAINS ET LES PIEDS



ONYCHOMYCOSES • VERRUES
ONGLES INCARNÉS
MYCOSES DU PIED
CALLOSITÉS

Emballage

Formulation huileuse

Ampoule 5 ml formulation huileuse

(emballage individuel)

Ref. 100101HY



Flacon de 50 ml en verre

(avec compte-gouttes)

Ref. 10050CGO



Flacon en verre de 100 ml

(avec vaporisateur)

Ref. 100610



Formulation en gel

Ampoule 5 ml formulation en gel

(emballage individuel)

Ref. 100501HY



Tube de gel de 30 ml

(avec applicateur)

Ref. 10030TGO



Flacon en verre de 100 ml

(avec vaporisateur)

Ref. 100100SPO




10 unités (10cmx10cm) Compresse imprégnées

(emballés individuellement)

Ref. 10010GMOS



Répertoire des pathologies

	APHTES _____	Page 8
	HERPÈS _____	Page 9
	ABCÈS _____	Page 10
	AVANT ET APRÈS LA RÉALISATION D'UN TATOUAGE _____	Page 11
	ACNÉ _____	Page 13
	OTITE EXTERNE _____	Page 14
	BRÛLURES (ÉGALEMENT LES BRÛLURES AU LASER) _____	Page 16
	ABRASIONS ET ECCHYMOSES _____	Page 17
	ECZÉMA ET URTICAIRE _____	Page 18
	HÉMORROÏDES (AMAS) _____	Page 20
	FISTULE ET CREVASSES ANALES/VAGINALES _____	Page 21
	DÉMANGEAISONS GÉNITALES _____	Page 22
	PIQÛRES D'INSECTE _____	Page 24
	PLAIES TRAUMATIQUES _____	Page 25
	MYCOSES _____	Page 26
	ENGELURES _____	Page 27
	CREVASSES MAINS ET PIEDS _____	Page 28
	ONYCHOMYCOSES _____	Page 30
	VERRUES _____	Page 31
	ONGLES INCARNÉS _____	Page 32
	MYCOSES DU PIED _____	Page 33
	TYLOME (CALLOSITÉS) _____	Page 34



APHTES • HERPÈS • ABCÈS
AVANT ET APRÈS LA RÉALISATION
D'UN TATOUAGE



PROPRIÉTÉS

Apaisante.

MODE D'APPLICATION

Dès que vous ressentez les premiers symptômes de démangeaisons et de douleur, il est recommandé d'appliquer la formulation huileuse Hyperoil® 2 à 3 fois par jour en petites quantités.

Par conséquent, il est possible de passer à une application quotidienne de la formule gel Hyperoil® (de préférence le soir) jusqu'à la disparition complète de la lésion.

EMBALLAGE RECOMMANDÉ

Phase aiguë



**Ampoule 5 ml
refermable**
Formulation Huileuse
(emballage individuel)

Entretien



**Ampoule 5 ml
refermable**
Formulation en Gel
(emballage individuel)

❖ Huile ou gel? Consultez la page 2



PROPRIÉTÉS

Apaisante et régénérante.

MODE D'APPLICATION

Dès que vous ressentez les premiers symptômes de picotements, de démangeaisons, de brûlures et de douleur, il est recommandé d'utiliser la formulation huileuse Hyperoil® 2 à 3 fois par jour jusqu'à un net soulagement. Par conséquent, il est possible de passer à une application quotidienne (le soir de préférence) jusqu'à la disparition complète des lésions.

EMBALLAGE RECOMMANDÉ

Phase aiguë



**Ampoule 5 ml
refermable**
Formulation Huileuse
(emballage individuel)

Entretien



**Ampoule 5 ml
refermable**
Formulation en Gel
(emballage individuel)

❖ Huile ou gel? Consultez la page 2



PROPRIÉTÉS

Celle-ci facilite la cicatrisation en réduisant la charge bactérienne et l'inflammation.

MODE D'APPLICATION

Quelle que soit la zone affectée, dès que les symptômes sont ressentis, il est nécessaire d'appliquer la formulation huileuse Hyperoil® 3 à 4 fois par jour jusqu'à nette atténuation des symptômes. Il est ensuite possible de réduire la fréquence des applications quotidiennes jusqu'à la disparition complète de la lésion.

N.B. : En l'absence de signes d'amélioration dans les 2 jours suivant l'application de la formulation Hyperoil®, consulter immédiatement un médecin.

EMBALLAGE RECOMMANDÉ

Phase aiguë



**Ampoule 5 ml
refermable**
Formulation Huileuse
(emballage individuel)

Entretien



**Ampoule 5 ml
refermable**
Formulation en Gel
(emballage individuel)



Tube de 30 ml
Formulation en Gel

❖ Huile ou gel? Consultez la page 2



PROPRIÉTÉS

Elle génère une action apaisante, aidant à protéger les tissus lésés, mais également à contrôler la charge bactérienne et à faciliter la régénération.

MODE D'APPLICATION

Traitement des lèvres: afin de préparer les lèvres avant un traitement esthétique, favorisant l'élasticité de la peau, il est recommandé d'appliquer quotidiennement une goutte de la formulation huileuse Hyperoil® pendant 3 jours, en massant délicatement. Il est ensuite nécessaire d'appliquer 1 goutte de la formulation huileuse Hyperoil® 3 à 5 fois par jour pendant 5 jours, en massant jusqu'à absorption complète.

Traitement des sourcils: après réalisation du traitement esthétique, appliquer 1 goutte de formulation de gel Hyperoil® 3 à 5 fois par jour en massant délicatement jusqu'à absorption complète. Répéter ce processus pendant au moins 15 jours.

EMBALLAGE RECOMMANDÉ

Traitement des lèvres:



**Ampoule 5 ml
refermable**
Formulation Huileuse
(emballage individuel)

Traitement des sourcils:



**Ampoule 5 ml
refermable**
Formulation en Gel
(emballage individuel)



ACNÉ
OTITES EXTERNES



PROPRIÉTÉS

Elle a une action apaisante et facilite la régénération des tissus endommagés.

MODE D'APPLICATION

Avant toute application d'Hyperoil®, nettoyer délicatement la peau avec de l'eau et un savon doux. Ne pas exfolier, égratigner ni presser le bouton afin d'éviter les lésions cicatricielles qui pourraient rester à vie. Appliquer une fine couche de formulation de gel Hyperoil® sur la peau et masser doucement jusqu'à absorption complète. Répéter l'opération tous les matins et tous les soirs lors de la phase aiguë et seulement le soir lors de la phase de transition.

EMBALLAGE RECOMMANDÉ



Tube de 30 ml
Formulation en Gel



PROPRIÉTÉS

Apaisante.

MODE D'APPLICATION

Dès que vous ressentez une douleur, appliquer 1 goutte de formulation huileuse Hyperoil® à raison de 2 fois par jour jusqu'à réduction conséquente des symptômes. Par la suite, il est possible de passer à une application quotidienne (le soir de préférence) jusqu'à disparition complète de la lésion.

EMBALLAGE RECOMMANDÉ



Flacon de 50 ml en verre
Formulation Huileuse
(avec compte-gouttes)



BRÛLURES (CELA INCLUT LES
BRÛLURES AU LASER)
ABRASIONS ET ECCHYMOSES
ECZÉMA • URTICAIRE

Brûlures (cela inclut les brûlures au laser)



PROPRIÉTÉS

Cette formulation facilite la régénération et la ré-épithelialisation des tissus en protégeant le tissu et en évitant toute macération de la zone environnante.

MODE D'APPLICATION

Appliquer une couche de formulation de gel Hyperoil® à raison de 2 à 3 fois par jour pendant les 2 premiers jours puis passer à une application quotidienne jusqu'à la cicatrisation complète de la peau.

En cas de cloques, appliquer la formulation huileuse Hyperoil® à raison de 2 à 3 fois par jour pendant les 5 premiers jours, puis passer à une application quotidienne et poursuivre jusqu'à la cicatrisation complète de la peau afin d'éviter la formation de cicatrices colorées ou chéloïdes. Dans ce cas, il convient de couvrir la brûlure avec des gazes stériles afin d'éviter les infections.

N.B. : Appliquer la formulation Hyperoil® sur la lésion et sur les zones qui l'entourent.

IMPORTANT : en cas de brûlure de IIème et de IIIème degré, consulter votre médecin.

EMBALLAGE RECOMMANDÉ



Tube de 30 ml
Formulation en Gel

En cas de cloques:



Flacon en verre de 100 ml
Formulation Huileuse
(avec vaporisateur)



PROPRIÉTÉS

Cette formulation favorise la régénération et la ré-épithélialisation, tout en contrôlant la charge bactérienne. Elle permet d'éviter toute macération autour de la lésion.

MODE D'APPLICATION

Nettoyer la lésion avec de l'eau et du savon doux ou une solution saline. L'utilisation de coton hydrophile est déconseillée, car celui-ci peut laisser des résidus. Pulvériser la formulation huileuse Hyperoil® sur la lésion et sur les zones autour de la lésion.

Si nécessaire, couvrir la plaie avec un pansement respirant afin de prévenir toute contamination bactérienne extérieure. Répéter l'opération quotidiennement puis tous les 2 ou 3 jours jusqu'à la guérison complète. Passer ensuite à la formulation de gel Hyperoil® ou à la pose de gazes médicales Hyperoil® dès que les tissus blessés commencent à se régénérer, ceux-ci prenant alors une teinte rose.

EMBALLAGE RECOMMANDÉ

Phase aiguë



**Flacon en verre
de 100 ml**
Formulation Huileuse
(avec vaporisateur)

Entretien



Tube de 30 ml
Formulation en Gel



10 unités (10cmx10cm)
Compresses imprégnées
Formulation en Gel
(emballés individuellement)

❖ Huile ou gel? Consultez la page 2



PROPRIÉTÉS

Apaisante.

MÉTHODE D'APPLICATION

Dès que vous ressentez des rougeurs et des démangeaisons, il est recommandé d'utiliser la formulation de gel Hyperoil® à raison de 2 à 3 fois par jour jusqu'à ce que les symptômes s'atténuent significativement. Par conséquent, il est possible de passer à une application quotidienne (le soir de préférence) jusqu'à disparition complète des symptômes.

En présence d'égratignures ou de pustules, il est recommandé d'utiliser l'Hyperoil® formule huileuse 2 à 3 fois par jour jusqu'à la constatation de l'amélioration de la lésion. Puis passer à Hyperoil® formule gel (voir ci-dessus).

En cas d'épisodes répétés d'eczéma, il est conseillé de poursuivre l'application de Hyperoil® formule gel pendant au moins une semaine après disparition des symptômes.

EMBALLAGE RECOMMANDÉ

Phase aiguë



Ampoule 5 ml refermable
Formulation Huileuse
(emballage individuel)

Entretien



Ampoule 5 ml refermable
Formulation en Gel
(emballage individuel)



Tube de 30 ml
Formulation en Gel



HÉMORROÏDES (AMAS) • FISTULE
CREVASSES ANALES/ VAGINALES
DÉMANGEAISONS GÉNITALES

Hémorroïdes (Amas)



PROPRIÉTÉS

Il a une action apaisante, favorisant la réduction de l'œdème.

MODE D'APPLICATION

Hyperoil® est indiqué dans le traitement des hémorroïdes externes et internes. Dans ce dernier cas, utiliser l'applicateur inclus dans le boîtier.

Lors de la phase aiguë, appliquer Hyperoil® formule de gel tous les matins et tous les soirs, et après chaque hygiène intime pendant les 5 premiers jours ; puis passer à une application quotidienne et après chaque hygiène intime (le soir de préférence) jusqu'à 15 jours et jusqu'à disparition complète des symptômes.

Ne pas utiliser trop de produit.

Une petite quantité de produit à chaque application est suffisante.

EMBALLAGE RECOMMANDÉ



Tube de 30 ml
Formulation en Gel
(avec applicateur)



PROPRIÉTÉS

Il a une action apaisante, favorisant la régénération des tissus.

MODE D'APPLICATION

Lors de la phase aiguë, il est conseillé d'appliquer Hyperoil® formule de gel tous les matins et tous les soirs, et après chaque hygiène intime pendant les 5 premiers jours en utilisant l'applicateur spécifique ; puis passer à une application quotidienne (le soir de préférence) et après chaque hygiène intime (le soir de préférence) pendant au moins 15 jours et jusqu'à disparition complète des symptômes.

Ne pas utiliser trop de produit.

Une petite quantité de produit à chaque application est suffisante.

EMBALLAGE RECOMMANDÉ



Tube de 30 ml
Formulation en Gel
(avec applicateur)



PROPRIÉTÉS

Apaisante.

MODE D'APPLICATION

Lors de la phase aiguë, il est recommandé d'appliquer la formule de gel Hyperoil® tous les matins et tous les soirs et après chaque toilette intime pendant les cinq premiers jours, à l'aide de l'applicateur si la démangeaison est également interne. Par conséquent, il est possible de passer à une application quotidienne et après chaque hygiène intime (le soir de préférence) jusqu'à la disparition complète de la lésion.

Ne pas utiliser trop de produit.

Une petite quantité de produit à chaque application est suffisante.

EMBALLAGE RECOMMANDÉ



Tube de 30 ml
Formulation en Gel
(avec applicateur)



PIQÛRES D'INSECTE
PLAIES TRAUMATIQUES
MYCOSES • ENGELURES
CREVASSES SUR
LES MAINS ET LES PIEDS



PROPRIÉTÉS

Apaisante.

MODE D'APPLICATION

Appliquer une très petite dose d'Hyperoil® formée de gel immédiatement après avoir été piqué par un insecte. Répéter l'application dès que vous ressentez une démangeaison dans les heures suivant la piqûre.

Poursuivre l'application de la formule de gel Hyperoil® 1 à 2 fois par jour pendant 3 à 4 jours, si la bosse apparaît.

EMBALLAGE RECOMMANDÉ



**Ampoule 5 ml
refermable**
Formulation en Gel
(emballage individuel)



Tube de 30 ml
Formulation en Gel



PROPRIÉTÉS

Il facilite la régénération des tissus et la ré-épithélialisation. Il évite les problèmes de macération des tissus.

MODE D'APPLICATION

Nettoyer la plaie avec de l'eau et un savon doux ou une solution saline. L'utilisation de coton hydrophile est déconseillé car il peut laisser des résidus.

En phase aiguë, appliquer une couche d'Hyperoil® formule huileuse sur la lésion sur les côtés entourant la lésion. Si nécessaire, couvrir la plaie avec un timbre respirant afin d'éviter des contaminations bactériennes extérieures.

Répéter l'opération quotidiennement puis tous les 2 ou 3 jours jusqu'à guérison complète en passant de l'Hyperoil® formule de gel ou Hyperoil® gazes médicales dès que les tissus blessés commencent à se régénérer, prenant une teinte rosée.

EMBALLAGE RECOMMANDÉ

Pour les lésions petites ou de taille moyenne:

Phase aiguë



**Ampoule 5 ml
refermable**
Formulation Huileuse
(emballage individuel)

Entretien



**Ampoule 5 ml
refermable**
Formulation en Gel
(emballage individuel)

Pour les lésions grandes ou multiples:

Phase aiguë



**Flacon en verre
de 100 ml**
Formulation Huileuse
(avec vaporisateur)

Entretien



Tube de 30 ml
Formulation en Gel

✦ Huile ou gel? Consultez la page 2



PROPRIÉTÉS

Il aide dans la régénération des tissus, en contrôlant la charge bactérienne. Il a une action apaisante.

MODE D'APPLICATION

Nettoyer la lésion avec de l'eau et du savon doux ou une solution saline. Appliquer Hyperoil® formule de gel en petites quantités (choisir l'emballage en fonction de la zone à traiter) et masser jusqu'à absorption complète. Répétez l'application deux fois par jour pendant les 5 premiers jours puis passez à une application par jour.

N.B. : dans certains cas, le traitement peut nécessiter un temps de guérison plus long, voire plusieurs mois.

EMBALLAGE RECOMMANDÉ

Pour les mycoses de petite ou moyenne taille:



**Ampoule 5 ml
refermable**
Formulation en Gel
(emballage individuel)



Tube de 30 ml
Formulation en Gel

Pour les mycoses de grande taille:



**Flacon en verre
de 100 ml**
Formulation en Gel
(avec vaporisateur)



PROPRIÉTÉS

Il facilite l'hydratation et la régénération de la peau.

MODE D'APPLICATION

Dès les premiers symptômes, particulièrement si les gerçures et les crevasses sont évidentes, l'application d'Hyperoil® formule huileuse est recommandée (le soir de préférence). Appliquer une dose de produit sur chaque bouton puis masser la zone atteinte avec soin. Couvrir avec des gants ou des chaussettes si besoin, en utilisant du coton blanc (qui est sans colorant). Si les lésions souffrent des changements fréquents de température dans la journée, appliquer 5 à 6 gouttes de produit et masser délicatement. Répéter 2 à 3 fois par jour jusqu'à amélioration de l'état puis poursuivre en appliquant le produit tous les soirs jusqu'à cicatrisation complète.

S'il n'est pas possible de couvrir avec des gants, utiliser Hyperoil® formule de gel qui est facilement absorbé et non gras.

EMBALLAGE RECOMMANDÉ



Flacon de 50 ml en verre
Formulation Huileuse
(avec compte-gouttes)



Tube de 30 ml
Formulation en Gel

❖ Huile ou gel? Consultez la page 2

Crevasses mains et pieds



PROPRIÉTÉS

Il favorise la régénération des tissus. Il a une action apaisante.

MODE D'APPLICATION

Lors de la phase aiguë, il est recommandé d'appliquer Hyperoil® formule huileuse tous les matins et tous les soirs. Puis passer à une application quotidienne de Hyperoil® formule de gel (le soir de préférence) pendant au moins 15 jours, en massant les zones affectées jusqu'à ce que les fissures disparaissent complètement.

Ne pas utiliser trop de produit.

Une petite quantité de produit à chaque application est suffisante.

EMBALLAGE RECOMMANDÉ

Phase aiguë



**Ampoule 5 ml
refermable**
Formulation Huileuse
(emballage individuel)

Entretien



**Ampoule 5 ml
refermable**
Formulation en Gel
(emballage individuel)



Tube de 30 ml
Formulation en Gel

❖ **Huile ou gel? Consultez la page 2**



ONYCHOMYCOSES • VERRUES
ONGLES INCARNÉS
MYCOSES DU PIED
CALLOSITÉS



PROPRIÉTÉS

Il favorise le contrôle de la charge bactérienne. Apaisante.
Il évite les problèmes de macération des tissus.

MODE D'APPLICATION

Nettoyer la lésion avec de l'eau et du savon doux ou une solution saline. Appliquer Hyperoil® formule huileuse en petites quantités deux fois par jour les 10 premiers jours et masser jusqu'à absorption complète. Puis, passer à une application quotidienne jusqu'à la guérison.

N.B. : dans certains cas, le traitement peut nécessiter un temps de guérison plus long, voire plusieurs mois.

EMBALLAGE RECOMMANDÉ

Phase aiguë



**Ampoule 5 ml
refermable**
Formulation Huileuse
(emballage individuel)

Entretien



**Ampoule 5 ml
refermable**
Formulation en Gel
(emballage individuel)



Tube de 30 ml
Formulation en Gel

❖ Huile ou gel? Consultez la page 2



PROPRIÉTÉS

Il facilite la régénération des tissus.

MODE D'APPLICATION

Si une sensation temporaire de verrue est remarquée, appliquer 1 dose d'Hyperoil® formule huileuse une fois par jour, en massant jusqu'à absorption complète. Poursuivre l'application jusqu'à disparition de la verrue.

N.B. : dans certains cas, le traitement peut nécessiter un temps de guérison plus long, voire plusieurs mois.

EMBALLAGE RECOMMANDÉ



**Ampoule 5 ml
refermable**
Formulation Huileuse
(emballage individuel)



Flacon de 50 ml en verre
Formulation Huileuse
(avec compte-gouttes)

Ongles incarnés



PROPRIÉTÉS

Il a une action apaisante. Il facilite la régénération de la peau lésée.

MODE D'APPLICATION

Nettoyer soigneusement la plaie à traiter avec de l'eau et du savon doux ou une solution saline. Appliquer l'Hyperoil® formule huileuse en petites quantités et masser jusqu'à absorption complète.

N.B. : dans certains cas, le traitement peut nécessiter un temps de guérison plus long, voire plusieurs mois.

EMBALLAGE RECOMMANDÉ

Phase aiguë



**Ampoule 5 ml
refermable**
Formulation Huileuse
(emballage individuel)

Entretien



**Ampoule 5 ml
refermable**
Formulation en Gel
(emballage individuel)

❖ Huile ou gel? Consultez la page 2



PROPRIÉTÉS

Il facilite la régénération des tissus et soulage les irritations.

MODE D'APPLICATION

Nettoyer soigneusement la plaie à traiter avec de l'eau et du savon doux ou une solution saline. Appliquer une petite quantité d'Hyperoil® formule gel deux fois par jour pendant les 3 premiers jours et masser jusqu'à ce qu'il soit complètement absorbé, puis passer à une application quotidienne.

N.B. : dans certains cas, le traitement peut nécessiter un temps de guérison plus long, voire plusieurs mois.

EMBALLAGE RECOMMANDÉ



Tube de 30 ml
Formulation en Gel



**Flacon en verre
de 100 ml**
Formulation en Gel
(avec vaporisateur)



PROPRIÉTÉS

Il aide dans la régénération des tissus en facilitant sa bonne hydratation.

MODE D'APPLICATION

En cas d'épaississement de la peau, appliquer, tous les soirs, quelques gouttes d'Hyperoil® formule huileuse sur la zone affectée et masser jusqu'à absorption complète. Si les callosités ne s'améliorent pas, consulter le personnel spécialisé (podologue) qui alors estimera si le retrait est nécessaire. Donc, poursuivre l'application de l'Hyperoil® formule huileuse tous les jours pendant 1 semaine au moins. Puis passer à 1 à 2 fois par semaine.

IMPORTANT : si la présence de rougeur, douleur, gonflement ou d'exsudat persiste sur la peau même une semaine après l'application de Hyperoil® formule huileuse, il est nécessaire de consulter un médecin ou de vous diriger vers les urgences. Les personnes souffrant de diabète et/ou de problèmes de circulation sanguine doivent en informer les professionnels de santé.

EMBALLAGE RECOMMANDÉ



**Ampoule 5 ml
refermable**
Formulation Huileuse
(emballage individuel)



Flacon de 50 ml en verre
Formulation Huileuse
(avec compte-gouttes)

Hyperoil[®]

Hyperoil[®]



Rev. July 2022

COD. 100810B-F

www.hyperoil.com

Hyperoil® est un produit de:



RI.MOS.

Disposable Medical Products

via Manuzio, 15
41037 Mirandola (MO) - Italie

Tél. +39 0535 25755

Fax +39 0535 25509

info@rimos.com

www.rimos.com

Entreprise certifiée



Dispositif médical de classe IIb